

嘉義縣輔具資源中心

病床無法升降簡易排除說明

- 一、說明：當病床無法控制升降功能時，故障原因可能為馬達控制器四個插頭鬆脫。
- 二、排除四步驟：

步驟一：請先確認馬達控制器的位置（如圖一）。



(圖一)

步驟二：置於病床床架下方，可沿著線控器線路確認插頭位置。（如圖二）



(圖二)

步驟三：將標示【M1】、【M2】、【M3】插頭向內壓緊。（如圖三）



(圖三)

步驟四：將線控器的插頭向內推緊。（如圖四）



(圖四)

- 三、若仍無法排除故障，則代表馬達或線控器故障損壞，需聯絡輔具中心維修人員進行維修。